



Oxivir® Tb Toallitas

Desinfectante general virucida, bactericida, tuberculocida y fungicida

Limpiador desinfectante previamente humedecido, listo para usar basado en la tecnología patentada AHP® para una limpieza rápida y efectiva.

Características y Beneficios

- Limpiador desinfectante en un solo paso potenciado por la tecnología AHP®
- Efectivo contra los patógenos clave: TB, SARM, Novovirus y VRE
- Mata VHB, VHC y VIH en un minuto. Mata la tuberculosis en 5 minutos y los hongos en 10 minutos
- Sin COV, sin fragancias agregadas y sin NPE. Ambientalmente responsable: el ingrediente activo se descompone en oxígeno y agua
- Compatible con la mayoría de las superficies duras, no porosas
- Conveniente: las toallitas previamente humedecidas facilitan las tareas más difíciles

Aplicaciones

- Limpia y desinfecta superficies de alto contacto en solo UN minuto
- No irrita los ojos y la piel





Oxivir® Tb Toallitas

Desinfectante general virucida, bactericida, tuberculocida y fungicida












Instrucciones de uso

Como desinfectante de un solo paso

- Limpia en profundidad las áreas sucias
- Aplica el producto con el spray grueso o con un paño descartable para limpiar superficies duras, no porosas e inanimadas
- Todas las superficies deben estar visiblemente húmedas por 1 minuto
- Deje que actúe por 5-minutos para TB y 10-minutos para hongos Deje secar al aire, seque las superficies con un paño para retirar cualquier residuo, o enjuague con agua limpia según sea necesario.
- **Nota:** No es necesario enjuagar al menos que se vaya a revestir o restaurar la superficie. Todas las superficies en contacto con alimentos deben ser enjuagadas con agua potable. No utilice el limpiador para limpiar vasos, platos ni utensilios.

Antes de utilizar el producto por primera vez sobre una superficie determinada, se recomienda probarlo sobre un área pequeña y discreta en caso de tener dudas sobre su incompatibilidad, o contactar a un representante de Diversey.

Datos técnicos	Oxivir® Tb Toallitas
EPA Reg. No.	70627-60 (Botes, Cubos, Recargas) 74559-3 (Paquetes suaves)
Color/Forma	Incoloro, toallita
pH	3
Aroma	Característica
Tiempo de conservación	2 años - 6 X 7 in Toallitas (Botes) 3 años - 7 X 8 in Toallitas (Botes), 7.48 x 10 in Toallitas (Paquetes suaves), 11X12 in Toallitas (Cubos y Recargas)

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Oxivir® Tb Toallitas	12 x cuenta 160 6 x 7 in. Toallitas / 15.24 x 17.78 cm Botes	Listo para usar	4599516 
Oxivir® Tb Toallitas	12 x cuenta 60 7 x 8 in. Toallitas / 17.8 x 20.3 cm Botes	Listo para usar	5388471 
Oxivir® Tb Toallitas	4 x cuenta 160 11 x 12 in. Toallitas / 27.9 x 30.5 cm Cubos	Listo para usar	5627427 
Oxivir® Tb Toallitas	4 x cuenta 160 11 x 12 in. Toallitas / 27.9 x 30.5 cm Recargas	Listo para usar	100823906 
Oxivir® Tb Toallitas	120 X 10 cuenta 7.48 X 10 in. Toallitas / 18.99 X 25.4 cm Paquetes suaves	Listo para usar	100949406 
Oxivir® Tb Toallitas	6 x 1 unidad (soporte de pared para usar con botes de 60 unidades)		9P700827 
Oxivir® Tb Toallitas	1 doble unidad destacan que no se sujete		9P700798 
Oxivir® Tb Toallitas	1 doble unidad destacan que se sujete		9P700797 
Oxivir® Tb Toallitas	6 x 1 Unidad con abrazadera de alambre que se fija a Montaje de plástico para pared (para usar con Canastos 6" x 7" de 160 cuentas)		9P700799 
Oxivir® Tb Toallitas	6 x 1 Unidad con abrazadera de alambre que no se fija a Montaje de plástico para pared (para usar con Canastos 6" x 7" de 160 cuentas)		9P700800 
Oxivir® Tb Toallitas	4 x 1 unidad cubeta grande con escuadra para montaje en pared (para usar con cubetas de 160 cuentas)		9P700829 

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diverseym.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diverseym.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.

AHP and Design® son marcas registradas de Virox Technologies, Inc., utilizadas bajo licencia.

www.diverseym.com

© 2018 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS7295 es (18/303)